


Jeringa prellenada con 10 ml de agua estéril AquaFlate Modo de empleo

PRECAUCIÓN: La legislación federal estadounidense restringe la venta de este producto a profesionales de la sanidad con licencia o por prescripción de estos.

**FABRICANTE:**

HR Pharmaceuticals Inc.
2600 Eastern Boulevard, Suite 201
York, PA 17402 (EE. UU.)
+1 (877) 302-1110
<http://www.hrpharma.com/>

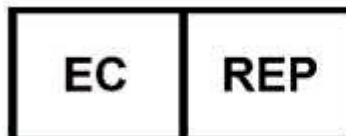

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

PRODUCTO:

N.º REF.	Descripción del producto	Estéril	Usos	Tamaño del envase
250-400	Jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate	Sí	Monoúso	10 ml

INDICACIONES DE EMPLEO:

La jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate está ideada para inflar el globo del catéter de Foley.

DEFINICIONES:

Ninguna.

DESCRIPCIÓN:

La jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate contiene 10 ml de agua depurada mediante láser de pulso ultracorto y esterilizada mediante irradiación gamma. Consta de un tubo y un émbolo de polipropileno. La punta del émbolo y la tapa de la jeringa son de caucho no producido a partir de látex.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna conocida.

ADVERTENCIAS:

- La jeringa prellenada de agua estéril está ideada ÚNICAMENTE para el inflado del catéter y NO se debe emplear para inyecciones.
- Las jeringas son monoúso y no se deben reutilizar ni volver a esterilizar.

PRECAUCIONES

- No utilice el producto si el envase se encuentra dañado o abierto.
- No utilice la jeringa si no viene tapada.
- La jeringa se debe desechar adecuadamente después de usarla una única vez.
- Lea las instrucciones de utilización y guarde la jeringa en un lugar seguro.
- Utilice el producto únicamente para el uso previsto; consulte las INDICACIONES DE EMPLEO.
- En las instrucciones de uso del fabricante del catéter de Foley, consulte la forma correcta de colocar el catéter e inflar el globo, así como la selección del volumen adecuado de agua estéril necesaria para inflarlo.

PREPARATIVOS, MANIPULACIÓN E INSPECCIÓN:

El producto debe inspeccionarse a fondo en el momento de la recepción y antes de su utilización, con el fin de asegurarse de que el envase no se encuentra dañado ni presenta defectos.

MODO DE EMPLEO:

1. Lea a fondo y siga las instrucciones de uso del fabricante del catéter de Foley.
2. Cuando vaya a utilizar el producto, retire la tapa de la jeringa y siga las instrucciones de uso e inflado del fabricante del catéter.
3. Cuando el catéter se encuentre correctamente colocado, deseche la jeringa de forma adecuada.

ALMACENAMIENTO:

- Para evitar reducir el rendimiento del producto, protegerlo de la luz solar directa.
- Guardar el producto en un lugar limpio y seco.