

AquaFlate™

Jeringa prellenada con 10 mL de agua estéril AquaFlate

Modo de empleo

REF

250-400 Jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate

DESCRIPCIÓN

La jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate contiene 10 mL de agua depurada mediante láser de pulso ultracorto y esterilizada mediante irradiación gamma. Consta de un tubo y un émbolo de polipropileno. La punta del émbolo y la tapa de la jeringa son de caucho no producido a partir de látex.

INDICACIONES DE EMPLEO

La jeringa prellenada con agua estéril AquaFlate está ideada para inflar el globo del catéter de Foley.

CONTRAINDICACIONES

Ninguna conocida.

ADVERTENCIAS

- La jeringa prellenada de agua estéril está ideada ÚNICAMENTE para el inflado del catéter y NO se debe emplear para inyecciones.
- Las jeringas son monoúso y no se deben reutilizar ni volver a esterilizar.

PRECAUCIONES

- No utilice el producto si el envase se encuentra dañado o abierto.
- No utilice la jeringa si no viene tapada.
- La jeringa se debe desechar adecuadamente después de usarla una única vez.
- Lea las instrucciones de utilización y guarde la jeringa en un lugar seguro.
- Utilice el producto únicamente para el uso previsto; consulte las INDICACIONES DE EMPLEO.
- En las instrucciones de uso del fabricante del catéter de Foley, consulte la forma correcta de colocar el catéter e inflar el globo, así como la selección del volumen adecuado de agua estéril necesaria para inflarlo.

PREPARATIVOS, MANIPULACIÓN E INSPECCIÓN

El producto debe inspeccionarse a fondo en el momento de la recepción y antes de su utilización, con el fin de asegurarse de que el envase no se encuentra dañado ni presenta defectos.

MODO DE EMPLEO

1. Lea a fondo y siga las instrucciones de uso del fabricante del catéter de Foley.
2. Cuando vaya a utilizar el producto, retire la tapa de la jeringa y siga las instrucciones de uso e inflado del fabricante del catéter.
3. Cuando el catéter se encuentre correctamente colocado, deseche la jeringa de forma adecuada.

ALMACENAMIENTO

- Para evitar reducir el rendimiento del producto, protegerlo de la luz solar directa.
- Guardar el producto en un lugar limpio y seco.



HR Pharmaceuticals, Inc.
2600 Eastern Blvd., Suite 201
York, PA 17402 USA
877-302-1110
hrpharma.com



Visite trucath.com para consultar el glosario de símbolos y tener acceso a más información.

AquaFlate forma parte de la familia de marcas de **HR**

HR y AquaFlate son marcas comerciales de HR Pharmaceuticals, Inc.
©2023 HR Pharmaceuticals, Inc. Todos los derechos reservados.